

# ZD PROTECT

*Reinigungs- und Pflegehinweise*



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer **ZD protect**

Diese Schiene wurde für Sie angepasst und auf Komfort ausgelegt.

Tragen Sie Ihre Schiene wie von Ihrem Zahnarzt verschrieben.

Bitte halten Sie sich an die regelmäßigen zahnärztlichen Termine und überprüfen Sie bei jedem Besuch den Sitz und den Zustand Ihrer Schiene. Wenn Sie Beschwerden oder Druck verspüren, wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt für die Nachbehandlung.

## Reinigung und Pflege Ihrer ZD protect Schiene

### 1. TÄGLICHE REINIGUNG

**Zahntechnik-Düsseldorf empfiehlt**, Ihre Schiene täglich vor und nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Verwenden Sie unmittelbar nach der Entfernung warmes Wasser (nicht mehr als 45°C) und Seife, um Speichelreste und Rückstände aus der Schiene zu entfernen.

### 2. VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTELN

Für die periodische Entfernung von Ablagerungen können Sie jedes handelsübliche Reinigungsmittel, wie zum Beispiel milde Flüssigseife verwenden.

### 3. VORSICHTSMAßNAHMEN

- Lassen Sie Ihre Schiene **NICHT** länger als 1 Stunde in einer Flüssigkeit stehen.
- Verwenden Sie **KEINE** Zahnpasta oder andere scheuernde Reinigungsmittel, da dies die Lebensdauer Ihrer Schiene verkürzen kann.
- Entsorgen Sie die Reinigungslösung nach jedem Gebrauch. Spülen Sie die Schiene vor dem Gebrauch gut aus.
- Die Schiene **NICHT** in Wasser, das heißer als 45°C ist, liegen lassen, da die Gefahr besteht, dass sich die Schiene verformt.

**Zahntechnik-Düsseldorf empfiehlt**, nicht mit der Schiene zu essen oder zu trinken.

Das Trinken von heißer Flüssigkeit kann die Passform der Schiene beeinträchtigen.

Bitte entfernen Sie die Schiene vor dem Essen, um optimale Leistung, Passform und lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Zur Vermeidung von Bakterien, achten sie bitte darauf, Ihre Schiene nach der Reinigung wieder trocken in die beigelegte Transportdose zu legen.

zahntechnik Düsseldorf rebbe.pak.joit.gmbh

Flinger Straße 11 40213 Düsseldorf

tel. +49 (0) 211-13879-0

info@zahntechnik-duesseldorf.de

www.zahntechnik-duesseldorf.de



Besuchen Sie unsere  
ZD PROTECT Webseite,  
um mehr über das  
Produkt zu erfahren.